

# ヒューマニー尿吸引パッド 男性用

尿吸引ロボ  
**Humany**  
ヒューマニー

**新発売**

ヒューマニーの特長である  
『朝までお肌を濡らさない』を  
最大限に発揮する**男性専用の  
吸引パッド**が発売になりました。



ヒューマニー本体

尿吸引パッド  
男性用

【パッド内側】  
(お肌側)

※「ヒューマニー本体」は従来と同じ製品です。



## 特長(1) 「陰のう」や「お尻」を濡らさない

- 陰茎を包み込む「袋型」のパッドなので、お肌を余計に濡らしません。
- 尿と便を分離することができるので、便失禁があっても清潔に使えます。

## 特長(2) パッドの装着が簡単

- パッドに陰茎を挿入するだけなので、装着がわかりやすく簡単です。
- お尻にパッドを敷き込まないので、座位や立位でも装着しやすくなります。

## 特長(3) 様々なアウター(紙オムツ・パンツ)と組み合わせできる

- スリムなパッド形状なので、テープ止めタイプの紙オムツだけでなく、パンツタイプなど様々なアウターと組み合わせ使用することができます。

## 特長(4) 自分でも装着できる

- 体の前でパッドに陰茎を挿入するだけなので、ご自身でも装着ができます。

【パッド外側】



※センサーが尿を感知して  
チューブから自動吸引します。


## 装着イメージ



①パッドにセンサーとチューブを接続してから、パッドの挿入口に陰茎を挿入します。



②陰茎を下向きにして  
パッドを装着します。

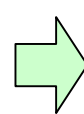

〈完成〉



テープ止め



パンツタイプ

③パッドの上からアウターをはかせます。

# ヒューマニー尿吸引パッド『男性用』は・・・

装着が簡単で  
わかりやすいから  
慣れるのが早い！



尿と便が混ざらないから、  
便失禁があっても  
清潔に使える！

座位や立位でも  
装着しやすい！



自分でも装着できるから、  
気兼ねなく使える！



アウターの組み合わせが自由だから、  
使い慣れたスタイルで導入できる！

だから、このような方におすすめします。

- ①「夜間頻尿」のため「睡眠不足」でお困りの方、「転倒事故」が心配な方
- ②「男性用尿とりパッド」では吸収量が少なく「何度もパッドの交換が必要」な方
- ③「長時間用の大判尿とりパッド」では「不快感」や「肌トラブル」でお困りの方

## ●従来パッドとの比較(男性がヒューマニーをご利用になる場合)

青字はメリット		従来の吸引パッド(平型・男女共用)	【新商品】吸引パッド『男性用』(袋型)
快適性	肌の濡れ	「陰部(陰茎・陰のう)」と「お尻の一部」が濡れてしまう	陰茎以外の部分は全く濡れない
	便失禁	便失禁の後はパッドの交換が必要になる	便失禁があってもパッドを交換しないで対処できる
使い勝手	装着手順	腰を起こしてパッドを装着する必要がある	腰を起こさずにパッドを装着できる
	アウター	「テープ止め紙おむつ」との併用が基本	アウターを自由に選択できる(紙パンツなど)
	自立性	パッドを自分で装着するのは難しい	自分でも容易にパッドを装着できる
利用者	体格	体格の良い方にはパッドの長さが不足して使いにくい	陰茎を包み込むので体格には関係なく使用できる
	寝姿勢	側臥位でモレやすい(男性は肌と隙間がしやすい)	側臥位でもモレにくい(陰茎を少し下向きにする)
	陰茎の長さ	陰茎の長さに関係なく使用できる	約4cm以上の長さが必要(短いとパッドから抜けやすい)

## 製品仕様



### ○ヒューマニー尿吸引パッド 男性用(16枚入) < 医療費控除対象品 >

- ・希望小売価格: オープン価格 ・JANコード: 4903111562497
- ・16枚入り/袋 ・袋寸法: 高さ140mm × 巾310mm × 奥行89mm ・袋重量: 282g
- ・4袋入り/ケース ・ケース寸法: 高さ195mm × 巾330mm × 奥行300mm ケース重量: 2kg

※ヒューマニー尿吸引パッドは「尿吸引ロボ本体」と一緒にご使用ください。

○尿吸引ロボ本体 < 介護保険 特定福祉用具購入対象品 >

- ・希望小売価格: ¥100,000(非課税) ・JANコード: 4903111572632 ・TAISコード: 01125-000001

## ユニ・チャーム ヒューマンケア株式会社

〒108-0074 東京都港区高輪3-25-23 京急第2ビル  
電話 03-3449-3596 FAX 03-5798-9835

<http://www.humany.jp>

製品のお求め、ご相談は・・・